



AUTOMAATTIRUISKUN PUHDISTUS JA SÄILYTYS

Yleisiä ohjeita

- Jos automaattiruiskun puhdistus ei onnistu kunnolla, käytä kertakäyttötarvikkeita
- Puhdista ruisku joka päivä käytön jälkeen
- Steriloi ruisku joka viikko, jos käytät sitä monena päivänä viikossa
- Steriloi ruisku kaksi kertaa kuukaudessa, jos käytät sitä kerran viikossa
- Lisää puhdistus- ja sterilointiohjeita löytyy ruiskun omista käyttöohjeista



Säilytä ruisku puhtaassa muovipussissa jääkaapissa.

Puhdistus joka käytön jälkeen

1. Pese kätesi
2. Pese ruisku ulkopuolelta harjalla ja tiskiaineella, käytä lämmintä vettä
3. Täytä ruisku pesuainevedellä ja ruiskuta tyhjäksi 3-5 kertaa

4. Huuhtelee ruisku ainakin 5 kertaa mahdollisimman kuumalla vedellä
5. Tyhjennä ruisku ja kuivaa se paperilla.
6. Ruiskuta pieni määrä puhdasta kasviöljyä kumiosiin, jos ne eivät liiku kunnolla
7. Säilytä muovipussissa tai puhtaassa säilytyslaatikossa jääkaapissa

Sterilointi keittämällä

1. Varmista että ruisku kestää keittämisen
2. Pese ruisku edellisen ohjeen mukaan. Työkentele puhtaalla pöydällä
3. Pura ruisku, laita suoraan kattilaan
4. Keitä osat runsaassa vedessä 10-20 min
5. Kaada vesi pois, nosta osat talouspaperille kuivumaan (pestyt kädet!)
6. Kokoa ruisku, kun se on vielä lämmin (puhdaat kädet!) ja säilytä puhtaasti (ks. edellä)

Sterilointi mikrossa

1. Sopii muoviruiskuille, joissa ei metalliosia
2. Pese ruisku edellisen ohjeen mukaan
3. Täytä ruisku puhtaalla vedellä ja kääri sen ympärille 10 märkää talouspaperikerrosta
4. Laita ruisku mikron kestävässä muovipussissa mikron, jätä pussi auki
5. Käynnistä mikro, korkea teho, 5 min.
6. Tarkista kuumennuksen puolivälissä, että paperi ei ole kuivat, kostuta tarvittaessa
7. Avaa paketti, tyhjennä ruisku
8. Jäähdytä ja säilytä puhtaasti (ks. edellä)